

GUIDE POUR AJOUTER LES PROGRAMMES DE LA SONDE TULIPE SUR LE PHENIX LIBERTY G3




Process à suivre :

Étape 1 : vérifier que le PHENIX LIBERTY est connecté à internet
Si oui passer à l'étape 1.5.


Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre les étapes suivantes :

1.1 Allumer votre PHENIX LIBERTY.

1.2 Une fois le logiciel lancé, appuyer sur la touche Windows qui se trouve en bas à gauche de votre clavier.


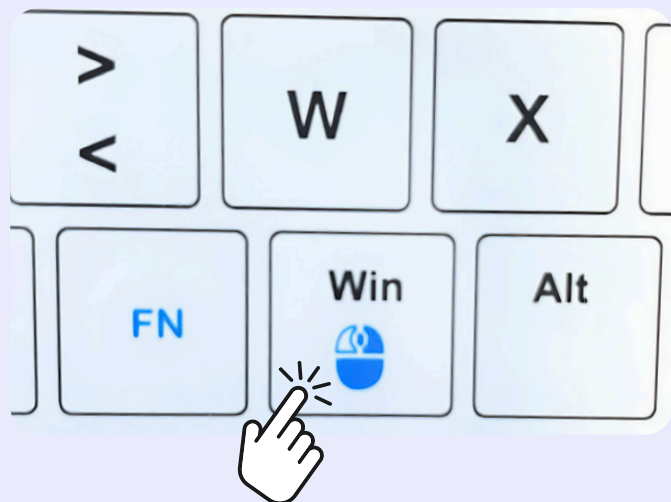


1.3 Cliquer ensuite sur l'icône réseau en bas à droite de votre écran.

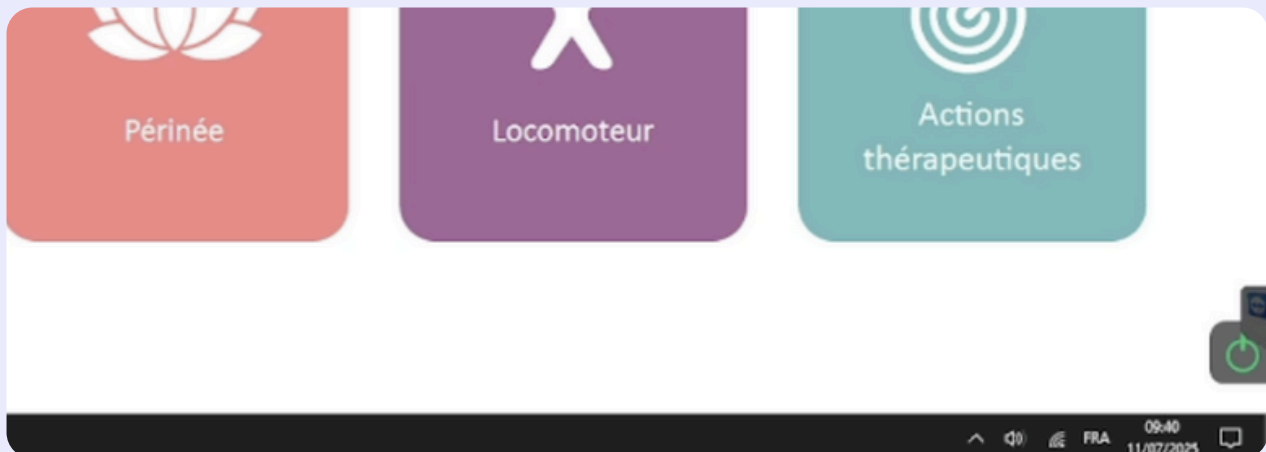

1.4 Cliquer sur WI-FI. Les réseaux disponibles s'affichent. Sélectionner votre réseau, puis renseigner votre N° de clé de sécurité (souvent situé sur l'étiquette de la borne wifi ou de la box) et valider. Votre LIBERTY est alors connecté sur le réseau.

1.5 **Arrêter le logiciel PHENIX** depuis la boîte à outils (voir les captures d'écran ci-dessous). Vous arrivez alors sur le bureau de votre Windows.

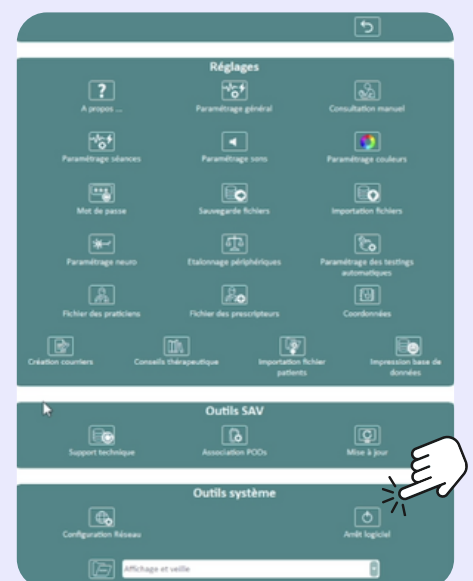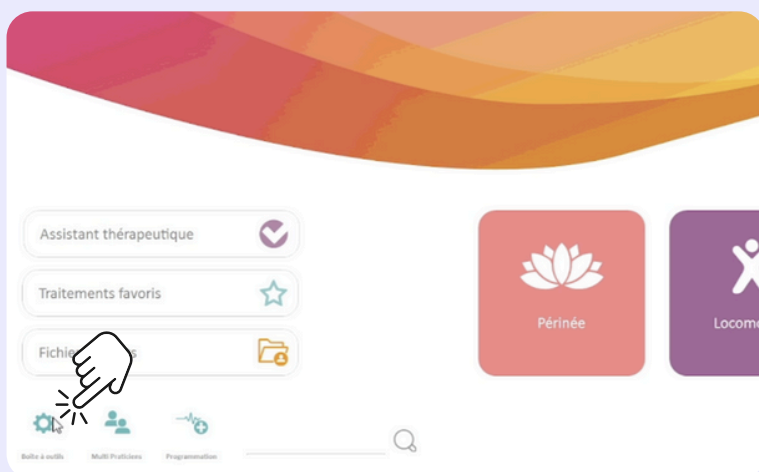

VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle
au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

Étape 2 : Téléchargement des fichiers

2.1 **Lancer le Navigateur Internet** : pour cela, cliquer sur la touche Windows de votre clavier puis, dans la barre de tâche cliquer dans la zone de recherche en bas à gauche et taper « Internet explorer... », puis cliquer sur « Internet Explorer ».

2.2 Saisir « **vivaltis.fr** » dans la barre de tâche du navigateur et cliquer sur la touche ENTREE du clavier.

2.3 Puis suivre le processus ci-dessous :



Espace SAV
Centre de téléchargement et support technique

Accès PHENIX Nano / Liberty
Accéder à l'espace SAV →

Accès PHENIX Micro / Neo
Accéder à l'espace SAV →

PHENIX Nano
Programmes de la Sonde Tulipe pour l'ensemble de la gamme Nano (Physio / Uro).
Cliquez sur votre langue :
[Flags]
Voir le tutoriel d'installation
Voir le pdf d'installation

PHENIX LIBERTY
Programmes de la Sonde Tulipe pour les PHENIX Liberty commercialisé avant mars 2022.
Cliquez sur votre langue :
[Flags]
Voir le tutoriel d'installation
Voir le pdf d'installation

PHENIX LIBERTY
Programmes de la Sonde Tulipe pour les PHENIX Liberty commercialisé après mars 2022.
Cliquez sur votre langue :
[Flags]
Voir le tutoriel d'installation
Voir le pdf d'installation


Voir le pdf d'installation

Voulez-vous exécuter ou enregistrer programme_sonde_tulipe.exe.exe (11,6 Mo) à partir de vivaltis.fr ?
Exécuter Enregistrer Annuler

Descendre en bas de la page et cliquer sur votre langue pour télécharger les programmes.



2.4 Sélectionner « **Windows (C:) ou disque local C** » en suivant les indications ci-dessous :

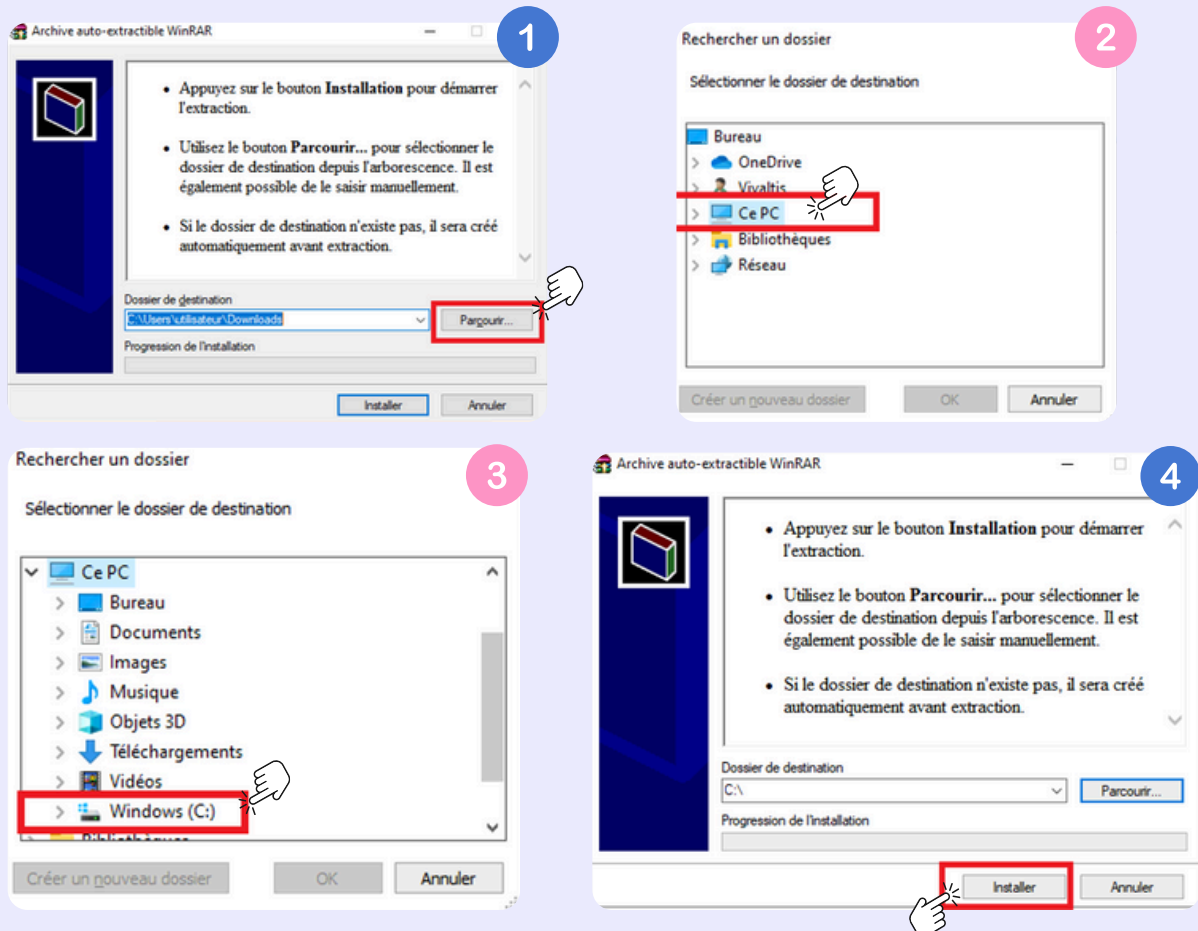


VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION


Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle
au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

2.5 **Attendre la fin de l'installation** ainsi que la fermeture de la fenêtre puis, **refermer toutes les fenêtres** ouvertes restantes ainsi que Internet Explorer.


Étape 3 : Installation des programmes de la sonde Tulipe

3.1 **Lancer l'explorateur Windows** présent soit en cliquant dans la barre de tâches de Windows sur l'icône () ou soit dans la barre de recherche située en bas à gauche, saisir « explo... », puis cliquer et sélectionner « Explorateur de fichiers ».

3.2 **Sélectionner le disque « Windows (C:) ou disque local C »**, puis double-cliquer sur le répertoire qui a été téléchargé « BD TULIPE FRA ». Puis vous arrivez sur l'écran ci-dessous, cliquer alors sur BDtulipe. Puis sur exécuter/run copy.

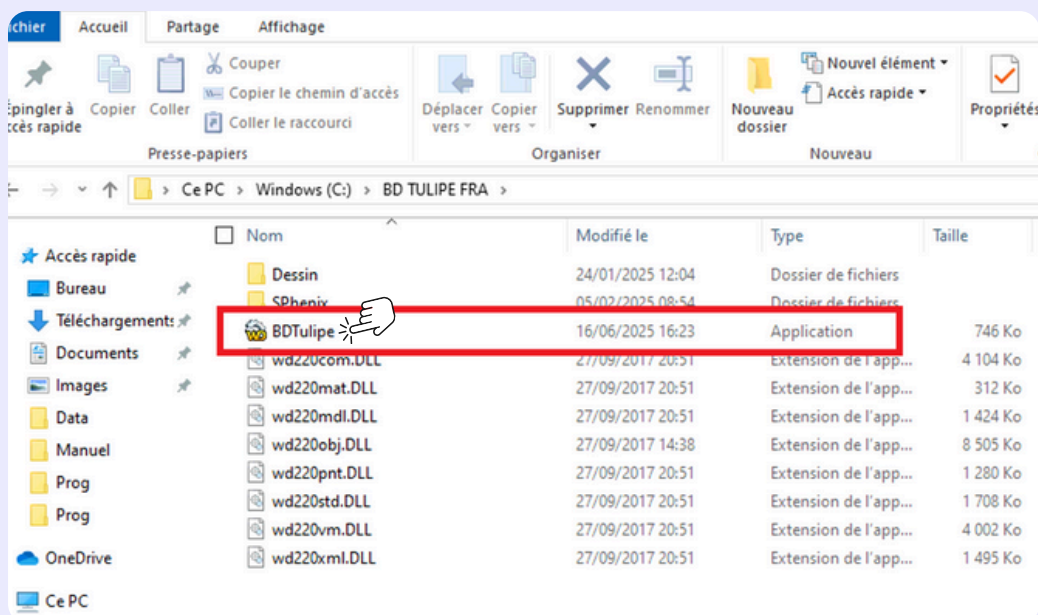

3.3 Attente la fin de l'installation et l'affichage du message suivant, puis cliquer sur le bouton « OK »

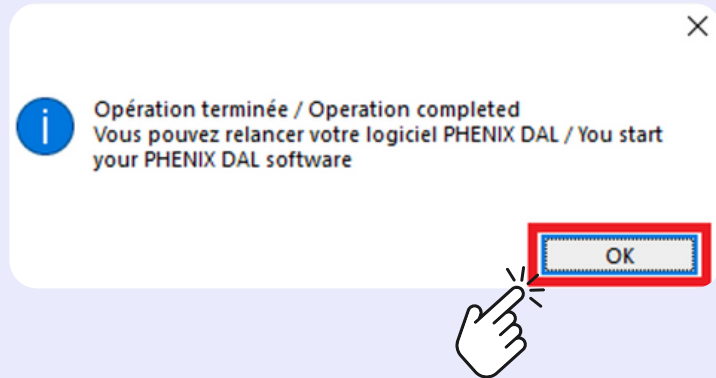


3.4 **Refermer toutes les fenêtres.**

Étape 4 : ajout des programmes dans le logiciel PHENIX





4.1 Lancer le logiciel PHENIX en cliquant sur l'icône présent sur le bureau de Windows « Phenix LIBERTY... ».

4.2 Lancer l'utilitaire de « **Restauration détaillée** » qui se trouve dans la boîte à outil de votre logiciel PHENIX, en suivant les indications ci-dessous :

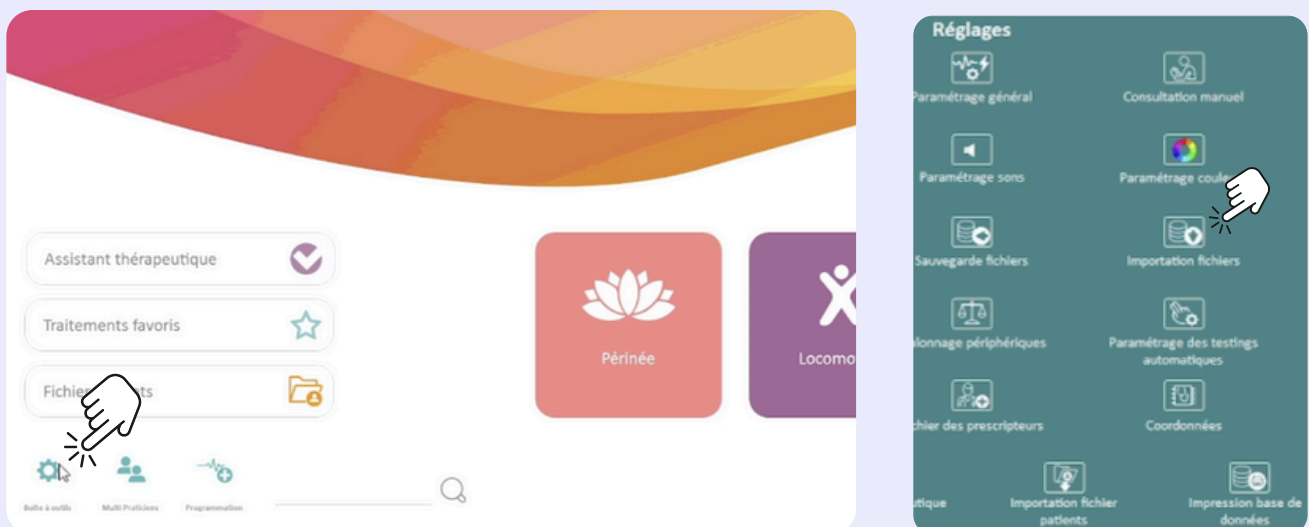

VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Parc Eureka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle
au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

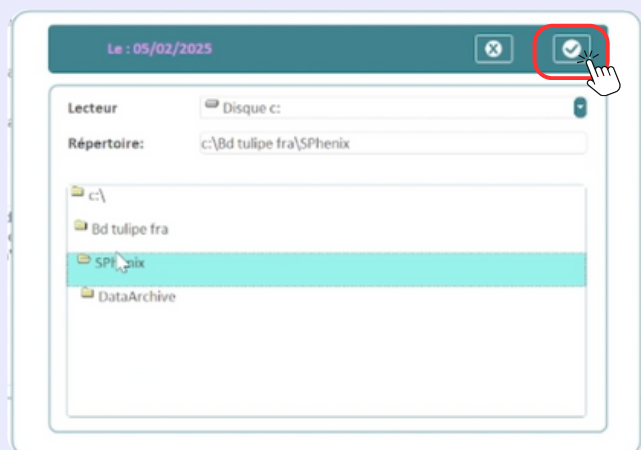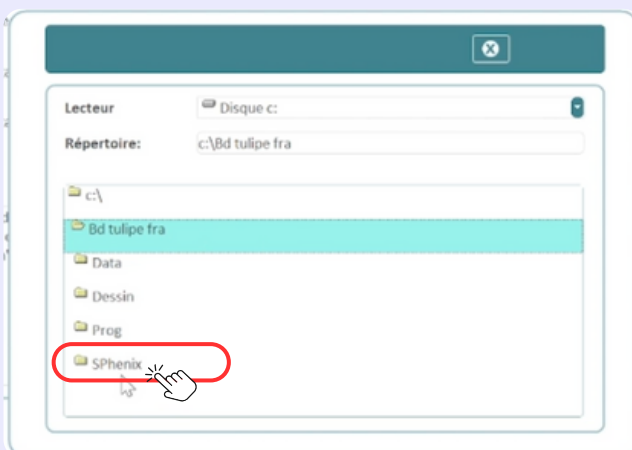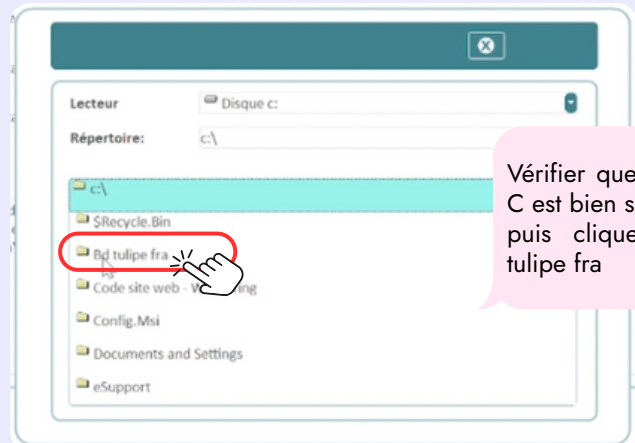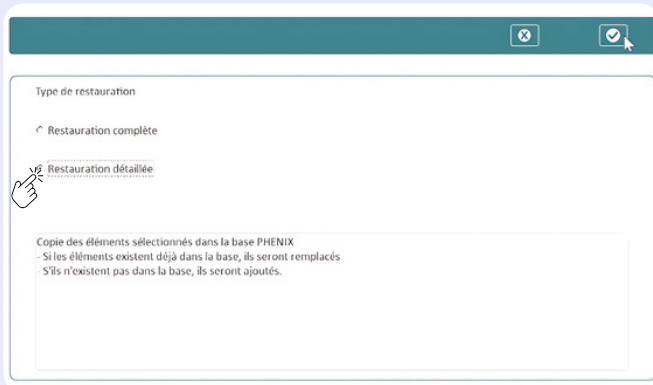

VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle
au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

4.3 **Attendre la fin de l'installation** (environ 1mn) et le message indiquant que le traitement est terminé. Cliquer sur le bouton de validation et ressortez de la boîte à outils.

Bravo vous disposez à présent des **protocoles spécifiques pour la sonde TULIPE !**

Pour les retrouver dans votre logiciel rien de plus simple !

Aller dans la rubrique « Périnée », puis sélectionner « Programmes avancés Sonde Tulipe ».

