

GUIDE POUR AJOUTER LES PROGRAMMES DE LA SONDE TULIPE SUR LE PHENIX NANO



Process à suivre :

Étape 1 : vérifier que le PHENIX Nano est connecté à internet
Si oui passer à l'étape 1.6.

Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre les étapes suivantes :

1.1 Lancer votre logiciel
PHENIX


1.2 Une fois le logiciel
lancé cliquer sur le bouton
d'accès à la boîte à outils.



1.3 Aller dans outils système puis sélectionner dans le menu déroulant **connexions réseau** puis valider en cliquant sur le **bouton orange avec les 3 points blancs**.

1.4 Cliquer sur WI-FI. Les réseaux disponibles s'affichent. Sélectionner votre réseau, puis renseigner votre N° de clé de sécurité (souvent situé sur l'étiquette de la borne wifi ou de la box) et valider. Votre Nano est alors connecté sur le réseau.

1.5 Fermer la fenêtre de connexion au réseau.

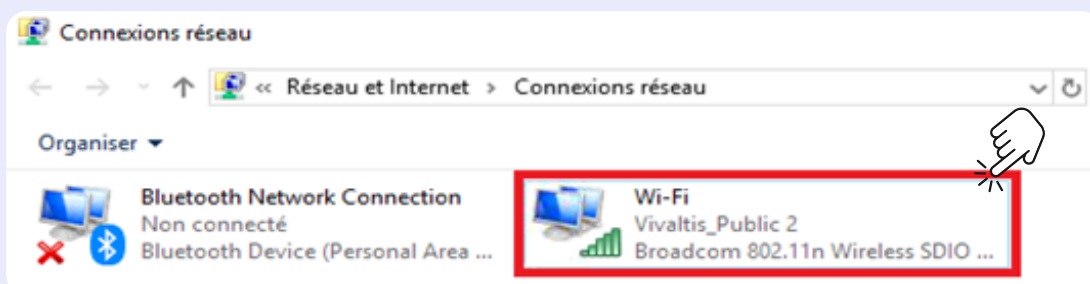

1.6 **Arrêter le logiciel PHENIX** depuis la boîte à outils (voir les captures d'écran ci-dessous). Vous arrivez alors sur le bureau de votre Windows.



VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

Étape 2 : Téléchargement des fichiers

2.1 **Lancer le Navigateur Internet** : pour cela, cliquer sur la touche Windows de votre clavier puis, dans la barre de tâche cliquer dans la zone de recherche en bas à gauche et taper « Internet explorer... », puis cliquer sur « Internet Explorer ».





2.2 Saisir « **vivaltis.fr** » dans la barre de tâche du navigateur et cliquer sur la touche ENTREE du clavier.

2.3 Puis suivre le processus ci-dessous :







The screenshot shows the 'Espace SAV' (Service After Sales) page for PHENIX. It features two main sections: 'Accès PHENIX Nano / Liberty' and 'Accès PHENIX Micro / Neo'. Below these, there are three columns for different models: PHENIX Nano, PHENIX LIBERTY (before March 2022), and PHENIX LIBERTY (after March 2022). Each column includes a list of languages (French, English, Spanish, German, Italian, Dutch) and buttons for 'Voir le tutorial d'installation' and 'Voir le pdf d'installation'. A hand icon points to the language selection area. At the bottom, a download bar shows the file 'programme_sonde_tulipe.exe' (11,6 Mo) with buttons for 'Exécuter', 'Enregistrer', and 'Annuler'.

Descendre en bas de la page et cliquer sur votre langue pour télécharger les programmes.

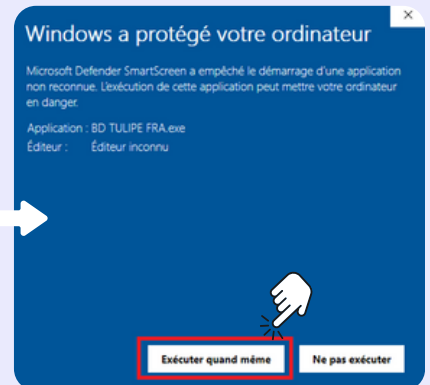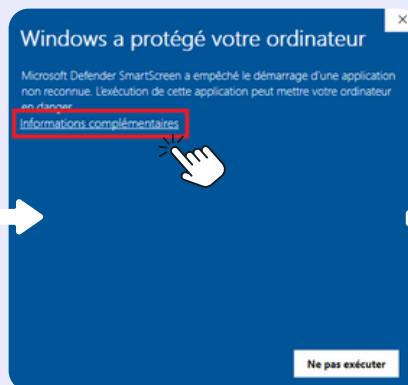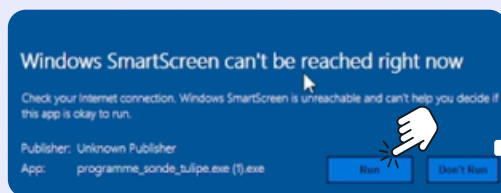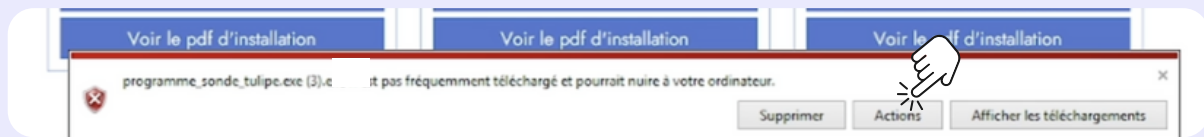

2.4 Sélectionner « **Windows (C:) ou disque local C** » en suivant les indications ci-dessous :

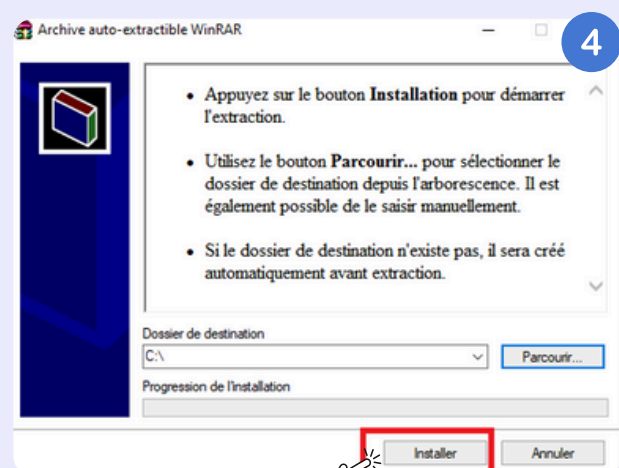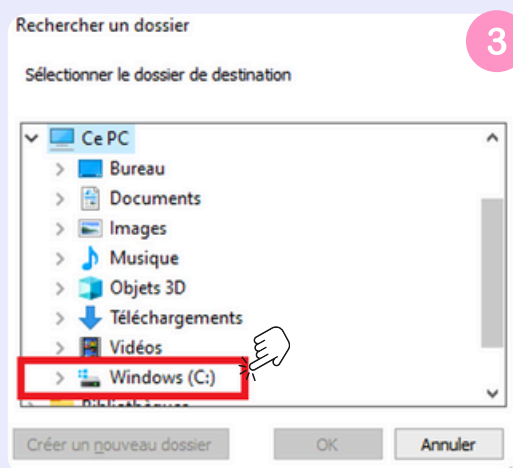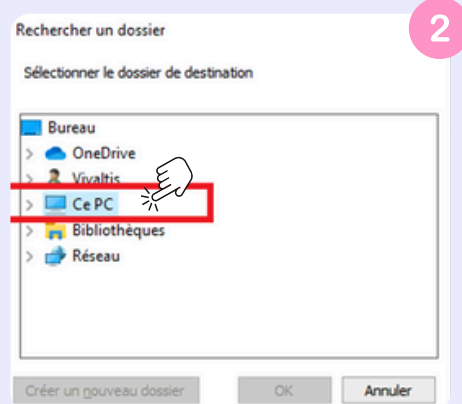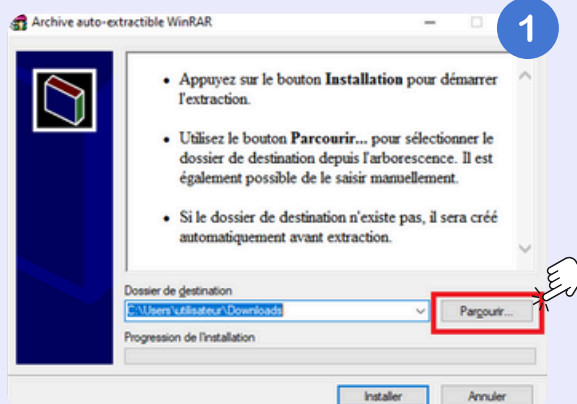


VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION



Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle
au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

2.5 **Attendre la fin de l'installation** ainsi que la fermeture de la fenêtre puis, **refermer toutes les fenêtres** ouvertes restantes ainsi que Internet Explorer.

Étape 3 : Installation des programmes de la sonde Tulipe

3.1 **Lancer l'explorateur Windows** présent soit en cliquant dans la barre de tâches de Windows sur l'icône () ou soit dans la barre de recherche située en bas à gauche, saisir « explo... », puis cliquer et sélectionner « Explorateur de fichiers ».


3.2 **Sélectionner le disque « Windows (C:) ou disque local C »**, puis double-cliquer sur le répertoire qui a été téléchargé « BD TULIPE FRA ». Puis vous arrivez sur l'écran ci-dessous, cliquer alors sur BDTulipe. Puis sur exécuter/run copy.

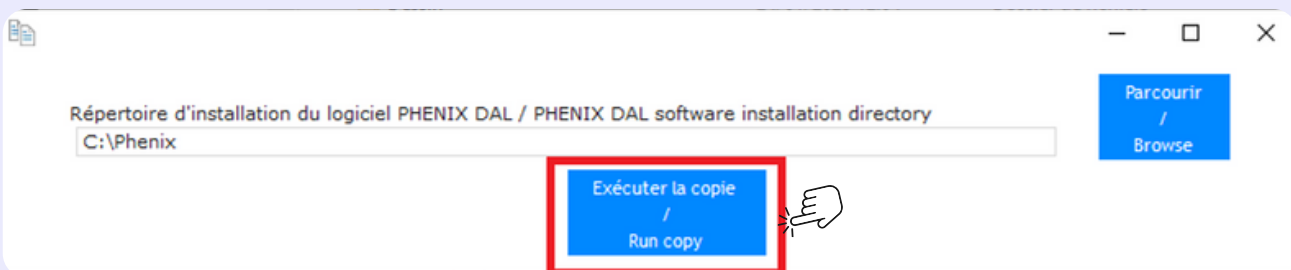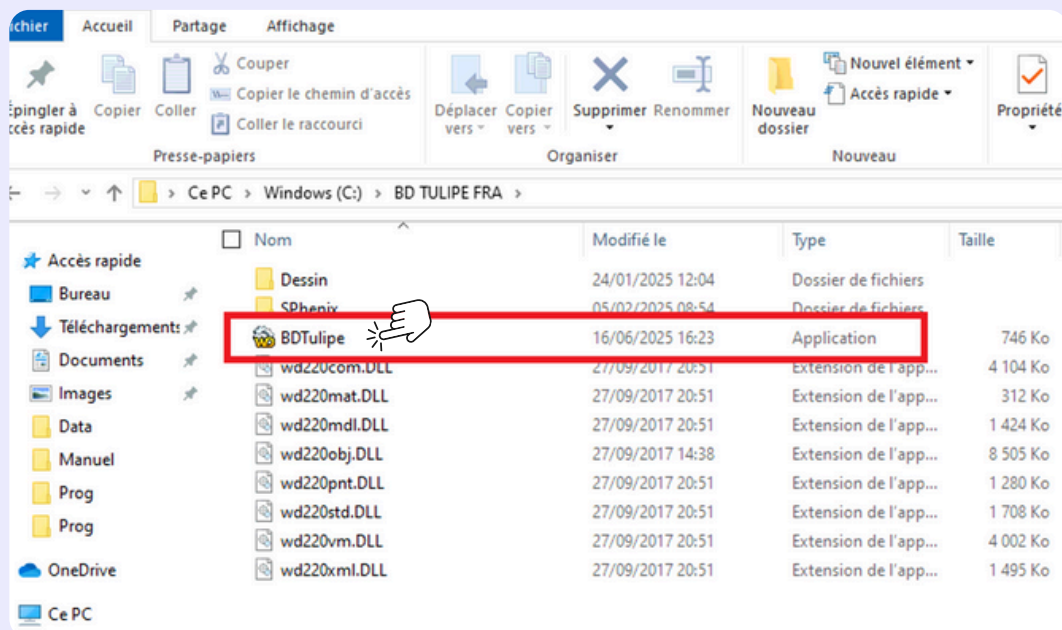

VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Parc Eureka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

3.3 Attente la fin de l'installation et l'affichage du message suivant, puis cliquer sur le bouton « OK »

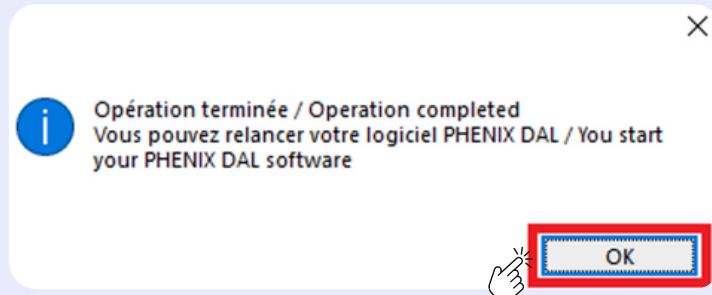

3.4 **Refermer toutes les fenêtres.**

Étape 4 : ajout des programmes dans le logiciel PHENIX






4.1 , Lancer le logiciel PHENIX en cliquant sur l'icône présent sur le bureau de Windows « Phenix Nano... ».

4.2 Lancer l'utilitaire de « **Restauration détaillée** » qui se trouve dans la boîte à outil de votre logiciel PHENIX, en suivant les indications ci-dessous :



VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Parc Eureka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle
au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

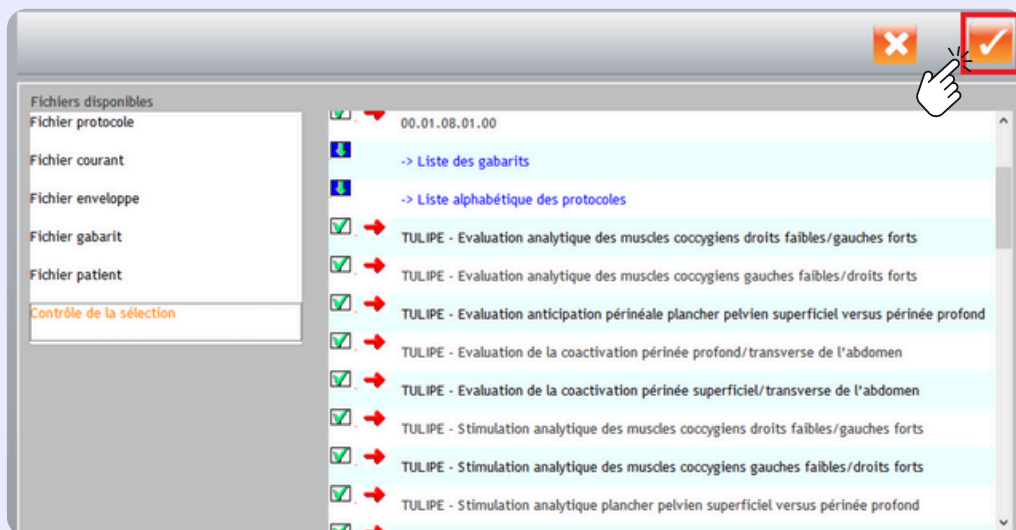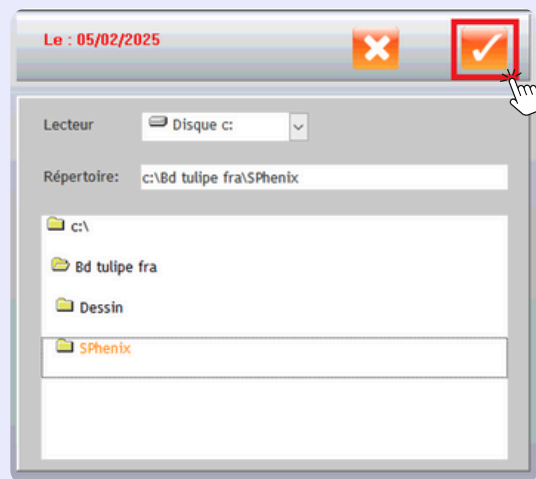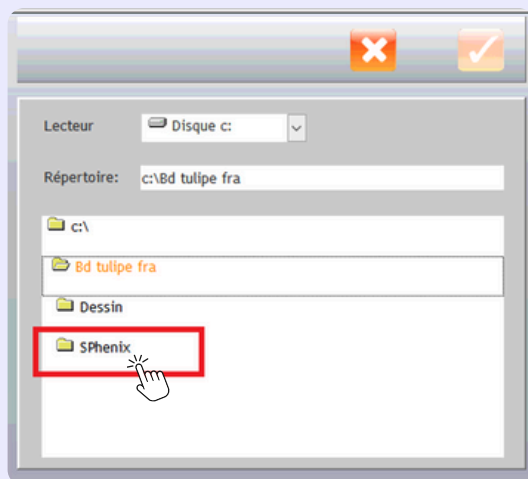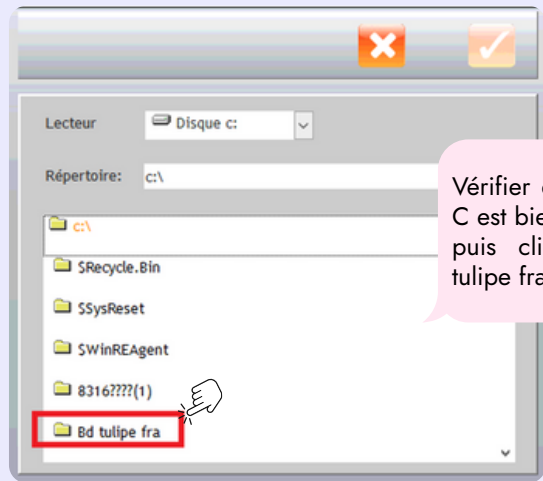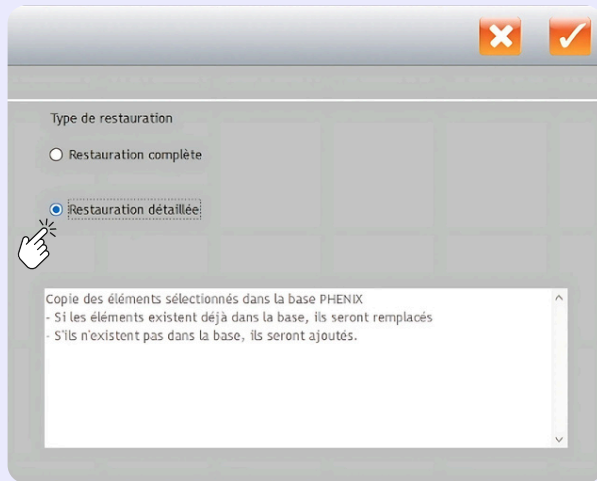

VIVALTIS / ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 MONTPELLIER Tel : 04 67 27 48 89 E-mail : marketing@vivaltis.com SAS Unipersonnelle au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465

4.3 **Attendre la fin de l'installation** (environ 1mn) et le message indiquant que le traitement est terminé. Cliquer sur le bouton de validation et ressortez de la boîte à outils.

Bravo vous disposez à présent des **protocoles spécifiques pour la sonde TULIPE !**

Pour les retrouver dans votre logiciel rien de plus simple !

Aller dans la rubrique « Pathologies », puis sélectionner « Périnéo-sphinctériennes urinaires et génitales », les programmes figurent tout en bas de la liste.

